

2010年1月21日

横山胃腸科病院 御中

株式会社IHIシバウラ
環境事業部
営業・メンテナンス部
メンテナンスグループ
宮 下

作 業 報 告 書

場 所：愛知県名古屋市中区千代田3-11-20

作 業 日：2010年1月18日

製造機番：000427

作業内容：総合点検契約

＊点検項目順に点検作業の実施（作業時間2.0h）

＊定期交換部品の交換作業（交換部品）

- ・吸着筒
- ・吸湿筒
- ・ドレン用フィルタ
- ・オゾン分解触媒

＊性能確認

オゾン水濃度 0.5mg/L（規格値0.3mg/L）

発生酸素 濃度：94.1%（規格値90%以上）

流量：0.80L/min（規格範囲値0.73～0.82L/min）

圧力：0.106～0.197MPa

コメント：不具合もなく動作良好。

以 上

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部営業メンテナンス

点検担当者: IHI シバウラ 宮下

点検年月日	2010/1/18	機種名	ONW-10	製造機番	427
設置場所				TEL	
納入時期	2005年 4月	使用時間		御対応者	クニカワ 様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
発生酸素	正常	☒	濃度:	94.1%	流量:	0.80 L/min 圧力: 0.106 ~ 0.197 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

22年 1月 18日

御署名 国川 珠生