

2010年8月11日

中津川市民病院 御中

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下



作 業 報 告 書

場 所：岐阜県中津川市駒場1522-1

作 業 日：2010年8月10日

機 種：ONW-10

製造機番：001114

作業内容：定期点検

＊ 点検項目順に点検作業の実施（作業時間1.5h）

＊ 定期交換部品の交換作業（交換部品）

- ・ドレン用フィルタ
- ・オゾン分解触媒

＊性能確認

オゾン水濃度 0.5mg/L（規格値0.3mg/L）

発生酸素 濃度：92.2%（規格値90%以上）

流量：0.77L/min（規格範囲値0.73～0.82L/min）

圧力：0.120～0.196MPa

コメント：動作良好。

以 上

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: IHI シバウラ 宮 下

点検年月日	22.8.10	機種名	ONW-10	製造機番	1114
設置場所	7F 呼吸器室			TEL	
納入時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
発生酸素	正常	☒	濃度: 92.2%	流量: 0.77 L/min 圧力: 0.120 ~ 0.196 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

22年 8月 10日

御署名

河原 あやみ