

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 6098

No. 110729

配 布 先	納 入 先	新鋭工業販売（株）名古屋本社 殿			機 種	ONW-10
客先	1				機 番	000387
環 営	1	所 在 地			納 入 日	平成 16 年 2 月 13 日
環 品	1	ユーザ名			受 付 日	平成 23 年 7 月 11 日
		岡田胃腸科クリニック 様			出 荷 日	平成 23 年 7 月 26 日
		点 検 者	中澤一裕	作業時間		
		返 送 先				
計	3	納入先と同じ				

修理依頼・苦情内容

異音発生

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異音につきまして

ONW-10は水ポンプが3台あり、部品を高速に回転してガスと水を送り出します。

この部品は水の膜に覆われて回転していますが、ポンプの能力が低下するとこの水の膜が消失し易くなり、その結果部品同士が直接こすれながら回転して、大きな音が発生します。

写真：交換済み 水ポンプ 3台



[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.47～0.53mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：94.0% 酸素流量：0.73 L/min 圧力：0.092～0.159MPa（60Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備 考
	水ポンプ P-1	1	オゾン水製造
	水ポンプ P-2	1	内視鏡洗浄
	水ポンプ P-3	1	排水

承認



審査



作成

H23.7.29

中澤