

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

フィルターに異物が引かかっていた

繊維状で直径約5mm

点検担当者: 中澤一裕

点検年月日	平成21年 10月 15日	機種名	ONW-10	製造機番	1242
設置場所	内視鏡室 右側 管理コート2006005			TEL	052-691-3171
設置時期	平成 18年 12月 12日	使用時間	2534	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☒	スイッチ 取り外し修理	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度:	91.8	%	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.139~0.237MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	パッキン 交換	☒
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	内部点検の結果 特に異状ありませんでした。 点検 定期交換部品の 交換をおすすめします。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
洗浄コネクタパッキン	一個	

21年10月15日

ご署名 保坂智恵美



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。