

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

4858

No. 100714

配布先	納入先	新鋭工業販売（株）名古屋本社 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県岡崎市中岡崎町1-10			機番	000883
環営	ユーザー名	宇野病院 様			納入日	平成18年2月9日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	2H	受付日	平成22年6月25日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成22年7月12日
計	3					


修理依頼・異常内容

定期メンテナンス

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

異常ありませんでした。運転カウンタ：2523回

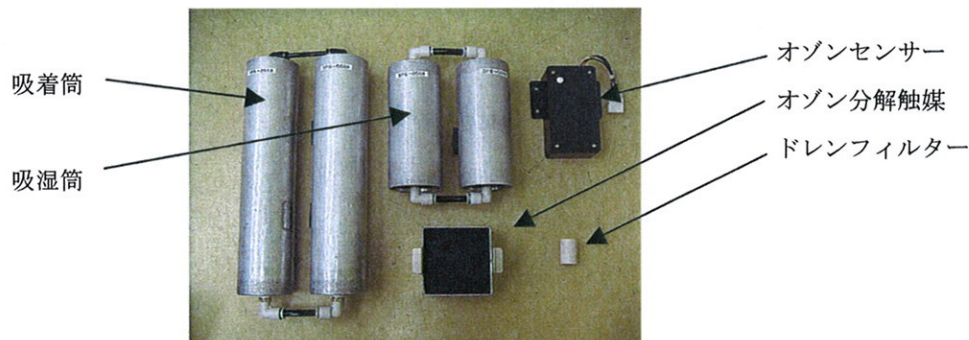

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.45～0.65mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：95% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.101～0.182Mpa
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

次回点検時は水ポンプと排水バルブチューブの交換をご検討ください。

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾンセンサー	1	
	オゾン分解触媒	1	
	ドレンフィルター	1	
	吸着筒、吸湿筒	1	SPS-10326

承認

江
22.7.14
口

審査

江
22.7.14
口

作成

H22.7.14

中澤