

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

フィルタランプ点検

(1500回運転のあけられで意味します)

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 9月 7日	機種名	ONW-10	製造機番	: 345
設置場所	1F 内科検査室			TEL	: 0564-21-0555
設置時期	平成 16年 6月 3日	運転回数	CMT99 7377	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 95.3 % 流量: 0.8 L/min 圧力: 0.124~0.215 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ FTS 修正	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 次回 交換 ☒

交換部品	数量	コメント
交換 ☐		フィルタランプ点検 リセット 性能は異常ありませんでした。
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		

クリニックさいとう

ご署名 長尾悦子 (長印)