

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

6894

No. 120417

配布先	客先	納入先	新鋭工業販売株式会社 名古屋本社 殿		機種	ONW-10	
環境	防品	所在地	愛知県岡崎市中岡崎 1-10		機番	000883	
		ユーザー名	宇野病院 様		納入日	平成 16 年 1 月 26 日	
		点検者	江口 博晃	作業時間	3 hr	受付日	平成 24 年 3 月 2 日
計	3	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 24 年 4 月 17 日	

修理依頼・苦情内容

エラー 6（PSA 酸素発生装置異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

PSA（酸素発生装置）のドレン電磁弁が故障していました。
この電磁弁を交換して復旧しました。また、性能が劣化した部品を交換しました。

写真 1：PSA 電磁弁（SV36）

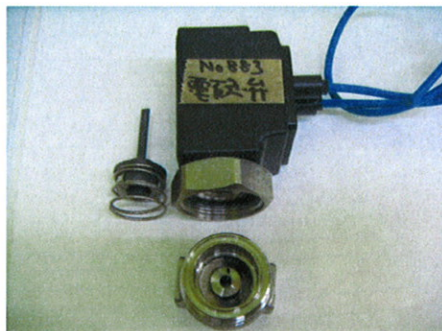


写真 2：有償交換部品



[2] 修理・点検内容

- 1: 部品交換及び内部清掃（下表および写真をご参照ください）
- 2: オゾン水濃度測定：0.61～0.49mg/L・・・正常
- 3: PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.6% 酸素流量：0.77L/min
圧力：0.093～0.169MPa（AC100V、60Hz）
- 4: オゾンインジケータ変色・・・正常
- 5: 運転確認・・・正常

ー以上ー

承認

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
江 24.4.17 口		PSA 電磁弁（SV36）	1	ドレン電磁弁
江 24.4.17 口		水ポンプ（P-1）	1	オゾン水製造用ポンプ
		水ポンプ（P-2）	1	内視鏡洗浄用ポンプ
		水ポンプ（P-3）	1	排水ポンプ
作成		フタスプリング	4	
H24.4.17 中澤		PSA 吸着筒、吸湿筒	1	今回無償