

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 11 月 11 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100120
作業年月日	平成 27 年 11 月 11 日		作業時間:	2.0 Hr
顧客名	西小田内外科胃腸科		TEL:	
所在地	名古屋市東区西里1丁目36番地		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 27 年 8 月 2 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒			修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

排水栓が動作せず、エラー表示が出て停止しています。

不具合原因、作業内容

排水栓のサム位置を元の位置へ(排水ラインの確認)。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☐ 履歴 0.28 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

試運転 1回→OK 2回目→OK 3回目→OK

装置情報	交換後運転回数: 1046	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 47/	殺菌+7L: 749
	リークチェック: 64	自己洗浄: 24/	7L-アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H27 年 11 月 11 日

ご署名

加藤 研一

印

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部

責任技術者

作業者

加藤

宮下