

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

フィルターに異物が引かかっていた。

テープ状の物で長さ約5cm → 新鋭が保管中

点検担当者: 中澤 一裕

点検年月日	平成21年 10月 15日	機種名	ONW-10	製造機番	1178
設置場所	下部内視鏡室 左側	管理コード	2006006	TEL	052-691-3171
設置時期	平成 18年 12月 12日	使用時間	2432	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.9 % 流量: 0.78 L/min 圧力: 0.132~0.229 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	内部点検の結果 特に異常はありませんでした。 現物を確認できませんでしたが テープは配管内に使用していません。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

21 年 10 月 15 日

ご署名 保坂 智恵美



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。