

2011年12月21日

西山団地内科胃腸科 御中

株式会社IHIシバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下

作 業 報 告 書

場 所：愛知県名古屋市名東区西里1丁目36番地
作 業 日：2011年12月19日
機 種：OED-1000
製造機番：100120

作業内容：保守点検

- * 点検項目順に点検作業の実施（作業時間1.0h）
- * 点検交換部品の交換作業（交換部品）
 - ・ オゾン濃度計
 - ・ オゾンガスセンサー
 - ・ 排水栓
 - ・ オゾン分解触媒
 - ・ フィルター
- * 性能確認
 - ・ 保守点検報告書参照
- * 清掃作業

以 上

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成23年12月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100120
作業年月日	平成23年12月19日		作業時間:	/ Hr
顧客名	西山田地内科胃腸科		TEL:	
所在地			担当	院長 様
販売店	新鋭工業株式会社		担当	澤田 様
納入年月日	平成22年8月2日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.75 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 1152 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 511	殺菌+7L: 818
	リークチェック: 14	自己洗浄: 270	7L単独: 0
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2023.12.19 日

ご署名

大沼 印

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部

責任技術者

作業者

宮下