

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 6月26日

|       |                                          |                                                            |       |                                               |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                                            | 製造番号: | 100098                                        |
| 作業年月日 | 平成24年 6月26日                              |                                                            | 作業時間: | 1.0 Hr                                        |
| 顧客名   | おかひ内科クリニック 様                             |                                                            | TEL:  | 0533-57-0211                                  |
| 所在地   | 愛知県新城市石原町計数家22-1                         |                                                            | 担当    | 様                                             |
| 販売店   |                                          |                                                            | 担当    | 様                                             |
| 納入年月日 | 平成28年 6月14日                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品   |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                              | 年 回目  | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |       |                                               |

|                 |
|-----------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 |
|                 |
|                 |
|                 |

|            |
|------------|
| 不具合原因、作業内容 |
|            |
|            |
|            |

| 点検項目     |    |                                     |           |    |                                                  |
|----------|----|-------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数         |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 / ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>              |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |           | 正常 | <input type="checkbox"/>                         |

|                           |
|---------------------------|
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |
|                           |
|                           |

|          |              |                                                                                |            |           |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 223 | 更新(リセット) 実施 <input checked="" type="checkbox"/> - 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌: 0.23   | 殺菌+7H: 0  |
|          | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 1                                                                        | アルコール単独: 0 | エア単独: 220 |

| 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------|-------|--------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|        |       | <input type="checkbox"/> |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

|                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>お客様ご確認署名欄</p> <p>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</p> <p>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。</p> | <p>24年 6月26日</p> <p>ご署名 氏 印</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部 営業・メンテナンス部  
長野県松本市石芝1-1-1  
0263-25-4756

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 宮下  |