

2012年7月23日

吉岡外科 御中

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下

作 業 報 告 書

場 所：愛知県あま市七宝町鷹居7-49

作 業 日：2012年7月20日

機 種：OED-1000

製造機番：100278

作業内容：保守点検

- * 点検項目順に点検作業の実施（作業時間1.0 h）
- * 点検交換部品の交換作業（交換部品）
 - ・ オゾン濃度計
 - ・ オゾンガスセンサー
 - ・ 排水栓
 - ・ フィルター
 - ・ オゾン分解触媒
- * 性能確認
 - ・ 保守点検報告書参照
- * 清掃作業

以 上

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 24 年 7 月 20 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100278	
作業年月日	平成24年 7 月 20 日		作業時間:	1.0 Hr	
顧客名	吉田外科 様		TEL:	052-441-5252	
所在地	長野県松本市塩田馬場7-49		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成23年 7 月 8 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 表示数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
消毒薬にベレギン-トリ-7を使用。			

装置 情報	交換後運転回数:	90	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌:	94	殺菌+アルコール:	0
	リークチェック:	72	自己洗浄:	0	アルコール単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日	
ご署名	吉田外科 様 井澤 夫 印

株式会社 IHI シバウラ 環境事業部 営業・メンテナンス部 長野県松本市石芝1-1-1 0263-25-4756	責任技術者	作業者
		宮下