

# 修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号 7379

No. 120911

配布先	納入先	新鋭工業販売(株) 名古屋本社 殿		機種	ONW-10B	
客先	所在地	愛知県日進市岩崎町芦廻間 87-1		機番	001486	
環営	ユーザー名	杉上クリニック 様		納入日	平成20年10月17日	
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	2Hr	受付日	平成24年7月24日
	返送先	納入先と同じ		発送日	平成24年9月11日	
計						

## 修理依頼・苦情内容


定期部品交換および各部点検

## 不具合原因 (故障箇所) と処置

### [1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

異常ありませんでした。

写真: 交換部品一式

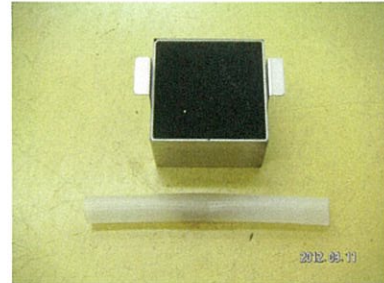

### [2] 修理・点検内容

- 内部清掃、部品交換
- 運転プログラム Ver 9 ⇒ Ver 11 書換え  
※性能は維持しながら、酸素消費量をより少なくなるように改善しました。
- オゾン水濃度測定: 0.46~0.52mg/L・・・正常
- 酸素ライン点検・・・正常  
酸素流量: 0.76 L/min
- 運転確認 異常なし。
- インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ: 673

H24.9.10

No1486



—以上—

## 交換部品

承認				
審査	部品番号	部品名称	数量	備考
		オゾン分解触媒	1個	
		排水シリコンチューブ	1本	今回無償
作成				
H24.9.11 中澤				