

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 - 裕

点検年月日	平成 22年 12月 6日	機種名	ONW-10	製造機番	:001110
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 0586-47-7200
設置時期	平成 18年 8月 24日	運転回数	1955	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.56 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度： 94.4 % 流量： 0.75 L/min 圧力： 0.101～0.182MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ - FTS 純正品	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒 } SPS-10349	1	異常ありませんでした。
吸湿筒 }	1	
ドレン用フィルタ	1	
排水シリコンチューブ	1	

平成22年11月26 受付

平成22年12月7 出荷

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。