

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

4804

No. 100722

配布先	納入先	新鋭工業販売（株）名古屋本社 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県蒲郡市府相町1-21			機番	000909
環営	ユーザー名	蒲郡クリニック 様			納入日	平成17年11月18日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	2H	受付日	平成22年5月31日
	返送先	納入先と同じ			発送日	平成22年7月16日
計	3					

修理依頼・異常内容


エラー8（オゾンガス漏れ）および定期点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エラー8はオゾンセンサーの故障が原因でした。

運転カウンタ：1604回

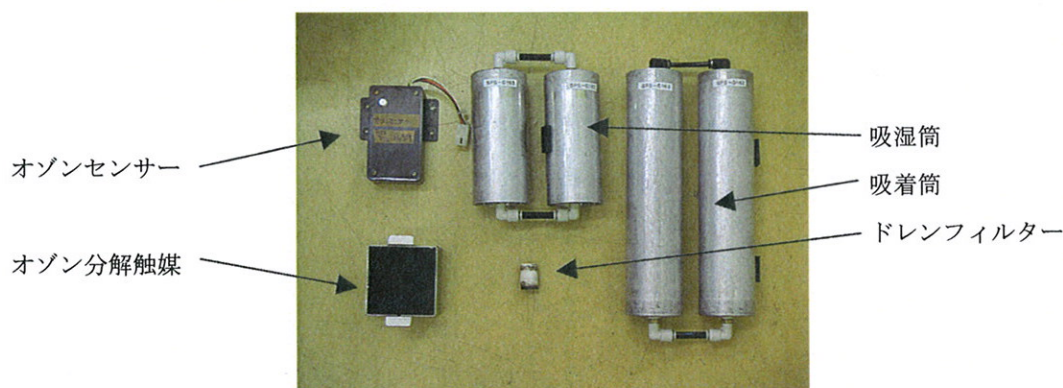

[2] 修理・点検内容

- 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.51～0.67mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.7% 酸素流量：0.79L/min 圧力：0.109～0.189Mpa
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾンセンサー	1	
	オゾン分解触媒	1	
	ドレンフィルター	1	
	吸着筒、吸湿筒	1	SPS-10321

承認



審査



作成

H22.7.22

中澤