

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 9 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100202	
作業年月日	平成 25 年 9 月 13 日		作業時間:	/ Hr	
顧客名	安江内科クリニック		TEL:	052-848-1788	
所在地	名古屋市中区大根町 370		担当	様	
販売店	新鋭工業販売 研究所		担当	内藤 様	
納入年月日	平成 23 年 7 月 22 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 2.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 238	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 35	殺菌+アル: 368
	リークチェック: 2	自己洗浄: 2	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 9 月 13 日
〒468-0022 名古屋市中区大根町 370

医療法人 安江内科クリニック

理事長 安江 直二

ご署名 TEL (052) 848-1788 印

修理業者 新鋭工業販売 株式会社



本社
名古屋市中区徳川2-16-42
TEL: 052-939-0700



静岡営業所
静岡市葵区千代田6-30-22
TEL: 054-208-3232

責任技術者

作業者

