

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 7 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100057
作業年月日	平成 25 年 7 月 17 日	作業時間: 1 Hr
顧客名	さかい内科 クリニク	TEL: 059-361-5001
所在地	三重県四日市市富田一色町 30-59	担当 榎
販売店		担当 榎
納入年月日	平成 25 年 7 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水温度計動作 正常 ☒ 水温数 49.7
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 181	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 2	殺菌+7L: 328
	リークチェック: 330	自己洗浄: 329	7L単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

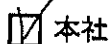
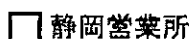
お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 阪井 直人 印

修理業者 新鋭工業販売 株式会社

名古屋市中区徳川2-16-42
TEL: 052-939-0700静岡市葵区千代田6-30-22
TEL: 054-208-3232

責任技術者

作業者

石原

野田