

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

NO. 8099

No. 130422

納入先	新鋭工業販売株式会社 名古屋本社 殿	機種	ONW-10
所在地	三重県四日市市大宮西町 10-6	機番	000148
ユーザー名	羽津内科クリニック 様	納入日	平成15年6月27日
点検者	小野定之	作業時間	受付日 平成25年4月12日
返送先	納入先と同じ	出荷日	平成25年4月22日

修理依頼・苦情内容

・エラー“6”発生（工場修理後ユーザ様返却時発生）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

・再現運転 1回目よりエラー“6”再現しました。

原因) ドレンフィルターのチューブがコネクタの奥まで入っていない
その箇所よりエアが漏れ圧力が上がらずエラーが発生しました。

対策) ドレンフィルターのチューブをコネクタの奥まで差し込み再度運転を確認
エラー“6”は発生しませんでした。
(今後、チューブの差し込み確認を重点的に実施)



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.38～0.55mg/L・・・正常

3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：90.8% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.134～0.232MPa (AC100V、60Hz)

4. 運転動作確認・・・正常

5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査



作成



交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考