

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

NO. 8099

No. 130318

納 入 先	新鋭工業販売株式会社 名古屋本社 殿			機 種	ONW-10
所 在 地	三重県四日市市大宮西町 10-6			機 番	000148
ユーザー名	羽津内科クリニック 様			納 入 日	平成15年 6月27日
点 検 者	小野定之	作業時間	1.5 H	受 付 日	平成25年 2月19日
返 送 先	納入先と同じ			出 荷 日	平成25年 3月18日

修理依頼・苦情内容

- ・水槽内に残水
- ・各部点検

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・本洗浄終了時 残り時間“0”にも関わらず洗浄槽内に残水があり
“18”の表示点滅の上 排水することを確認しました。
- ・排水シリコンチューブの劣化が原因でしたので、これの交換と装置内の排水系統を分解清掃して復旧しました。

写真) 1 参照

写真) 1

排水シリコンチューブ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.56～0.61mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：90.9 % 酸素流量：0.82 L/min 圧力：0.130～0.228MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認
安 25.3.20 田
審査
中 25.3.20 澤
作成
小 13.3.19 野

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水シリコンチューブ	1本	