

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 6月 4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 O E D - 1 0 0 0		製造番号：	100839
作業年月日	平成 26年 6月 4日		作業時間：	Hr
顧客名	白鳥病院 様		TEL：	0575-82-3131
所在地	岐阜県郡上市白鳥町為真 1 2 0 5 - 1		担当	師長 様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 25年 7月 29日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	ナシ
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・ オゾンリーク異常（4回） オゾン漏れおよびオゾンセンサー A S S Y 誤作動				
・ 濃度維持異常（9回）、オゾン水生成異常（2回） 脱気フィルターの詰まりにより発生				
脱気フィルター代替え機入れ替えの際 交換を実施との内容				
不具合原因、作業内容				
・ 再現確認運転を 10 回以上実施しましたが異常は再現しませんでした。				
・ オゾンガスモニターによるオゾン漏れを測定しましたが問題ありませんでした。				
・ オゾンセンサー A S S Y 誤作動の為 センサー交換 ・ 脱気フィルター交換（10 μ）従来品				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 L E D	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 630
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☐	ナシ
トレー	正常 ☐ ナシ	殺菌チューブ類	正常 ☐	ナシ
殺菌槽コネクタ	正常 ☐ ナシ		正常 ☐	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				
・ 部品交換後の確認運転にて異常は発生しませんでした。				
・ H 2 6 . 7 . 2 9 納入1年目保守点検の際 脱気フィルター 40 μ に変更（目詰まり対策）				

装置 情報	交換後運転回数：525 更新（リット）実施 ☒ 実施			殺菌：48	殺菌＋AL：477
	リークチェック：27	自己洗浄：25		アルコール単独：1	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		脱気フィルター		☒	1個
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☒	1個			☐	

お客様ご確認署名欄			
・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。			
・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。			
ご署名		年 月 日	
ご署名		印	

修理業者 株式会社 I H I シバウラ 機械事業部
サービスグループ
東京都江東区東雲1-7-12 K D X 豊洲グランスクエア 9 階
TEL：03-5859-5012

責任技術者	作業者
廣 '14/06/05 中	小 '14/06/05 野