

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

9438

No. 140619

納入先	新鋭工業販売（株） 名古屋本社 殿			機種	ONW-10
所在地	岐阜県岐阜市芥見大般若 1-84			機番	000955
ユーザー名	河村病院 様			納入日	平成 19 年 12 月 3 日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成 26 年 3 月 17 日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 6 月 18 日

修理依頼・不具合内容

エラー 6（PSA；酸素発生器異常）

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

ドレンフィルターの詰まりを検知してエラー 6 が発生しました。
また、酸素濃度を測定したところ、規定の90%以上に対して77%と低下していました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください
- オゾン水濃度測定：0.41～0.53 mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.9 % 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.105～0.188 MPa（AC100V 60Hz）
- 運転動作確認・・・正常 運転カウンタ 1243
- オゾンインジケータ変色・・・正常

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	PSA 部品	1 式	
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルター		
	オゾン分解触媒	1 個	

承認

審査

作成

H26.6.19

中澤