

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 150203

発行日 平成 27年 2月 3日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 O E D - 1 0 0 0 S		製造番号：	300024
作業年月日	平成 27年 2月 3日		作業時間：	2 Hr
顧客名	医療法人 鉄友会 宇野病院 様		TEL：	0564-24-2211
所在地	愛知県岡崎市中岡崎1番地10		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 25年 5月 6日	保証期間 内 外	付属品	トレー
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検	年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修 理		修理表示貼付	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・消毒槽異常 (E:101) 発生 \*処理中に消毒槽の水位が下がったときに表示されます。
- ・納入より1年経過済 保守点検未実施の為 点検依頼

不具合原因、作業内容

- ・排水栓と洗浄槽との隙間にゴム状の輪っかがありました。(密閉性を阻害して水位低下と思われます。異物除去後の運転では、異常は発生しませんでした。消毒+アル；1回 消毒；1回

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	消毒槽 L E D	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 505
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常	電源コード	正常 ナシ
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	消毒チューブ類	正常 ナシ

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

- ・保守点検部品交換後 消毒+アル；1回 消毒；1回 運転確認は正常に終了しました。

装置情報	交換後運転回数： 1100 0 更新(リット) <del>実施</del> ・未実施	消毒： 1084	消毒+アル： 16
	リークチェック： 0	自己洗浄： 3	アルコール単独： 0
			エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1				
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1				
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1				
オゾン水濃度計用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1				
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1				

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 株式会社 I H I シバウラ 機械事業部  
サービスグループ  
東京都江東区東雲1-7-12 K D X 豊洲グランスクエア 9階  
TEL：03-5859-5012

責任技術者	作業者
	