

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成21年 6 月 11 日	機種名	ONW-10	製造機番	000679
設置場所	1F 検査室	TEL:			
設置時期	平成16年 8 月 12 日	使用時間	1022回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐	
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換	☐	
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐	
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度:	0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度: 92.5 %	流量: 0.79 L/min	圧力: 0.094~0.167 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
清掃				
外装	正常 ☒	清掃	☐	
内部	正常 ☒	清掃	☒	O ₃ ガス排気タフト
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式 ☒	異常ありませんでした。 プログラムの変更に伴い12回 運転ごとに「フィルタ・ランプ」が 点滅して掃除の時刻をお知らせします。
吸湿筒	一式 ☒	
ドレン用フィルタ	一個 ☒	
オゾン分解触媒	一個 ☒	

年 月 日

ご署名 寺西 史東

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。