

IM-205



株式会社IHI


機械事業本部 営業

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新1-10-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

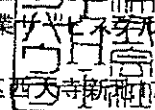

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	根本医院	製造番号	100078	ご確認	照
	住所	土浦市神立中央1-16-11	納入日	2016年4月10日		
			納入検査実施者	エムシーセス(株) 大塚 善田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		(有)	ラック仕様切替(ハントピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切替
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45~50℃)		✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他		
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
運転検査結果			良好	トシ	0/2
			不良		

特記事項

モニター専用ラック使用(スペースOK)

給水限度時間 145秒、給湯限度時間 147秒