

IQW IM-205-1

株式会社HIAグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャー・ディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様用

お客様	名称	杉田歯科医院 様	製造番号	100274	杉田歯科医院 茨城県高萩市本町1-23 TEL 0293-24-3011 杉田 裕一
	住所	茨城県高萩市本町1-223	納入日	2017年12月17日	
		TEL 029-324-3911	納入検査実施者	エムシーサービス(株)大里・行州	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装 設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価 性能 その他	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水／湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転 検査 結果	☒ 良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
特記事項					

IQC IM-205-1

株式会社HHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

モリタ用

お客様	名称	杉田歯科医院 様	製造番号	100274 / 100287	ご確認 杉田歯科医院 高萩市本町1-223 TEL 0293-24-3911 杉田 裕
	住所	茨城県高萩市本町1-223	納入検査実施日	2017年12月17日	
	TEL	029-324-3911	納入検査実施者	エムシーサービス(株)大里・行川	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレイのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認、設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項