

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 9月 28日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 27 日 作業時間: 4 Hr
顧客名	てらかど歯科クリニック 様 TEL: 029-353-8281
所在地	茨城県水戸市双葉台5-797-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100121	運転回数:	タチハネVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラー7 循環水圧低下			
原因			
① 循環ポンプインペラ破損 . . . 水質等によるインペラの膨潤、ケーシング固着による破損			
処置、作業内容			
・循環ポンプ交換 フッ素加工済対策品（膨潤対策）			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
・定期メンテナンス実施			
特記事項			
・洗浄槽内フィルターおよび槽内洗浄消毒モードの定期的な実施をお願い致します			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ（対策品）		1		
2	ドア開閉対策部品		1 式		
3	DPIチューブ		2 セット		
4	ドアパッキン		1 セット		
5	HEPAフィルター		1 セット		
6	プレフィルター		1 セット		
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒911-4145 茨城県水戸市双葉台5丁目797-1
てらかど歯科クリニック
 院長 寺門 重徳
 TEL 029-353-8281 FAX 029-353-8213

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '18/10/01 元森	環PJ '18/10/01 関口

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	てらかど歯科クリニック 様	製造番号	100121	点検実施日	2018年9月27日	ご承認印
	住所	茨城県水戸市双葉台5-797-1	運転回数		点検実施者	IHIアグリテック 関口	
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当者	水戸営業所 伊藤様	

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水井の作動・漏れ
- ☒ 給湯井の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷


消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

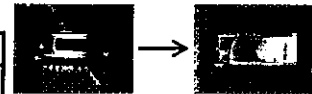

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ DPIチューブ	1
・仕上剤ポンプ DPIチューブ	1
・ドアパッキン一式	1
・HEPAフィルタ	1
・プレフィルタ	1
・循環ポンプ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030