

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 1日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 10 月 26 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	こむろ歯科医院 様 TEL: 029-275-4184
所在地	茨城県ひたちなか市大字津田1948-2 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シム記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100004	運転回数: 1026	ソフトウェア Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① エラー4 シャットダウン			
原因			
① 循環ライン継手エルボ破損による機体内漏水			
処置、作業内容			
・ストレートエルボ樹脂継手交換			
・ドア開閉対策部品交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 ・ストレートエルボ樹脂継手		1		
2 ・ドア開閉部品一式		1		
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		
		合計		

〒312-0032 茨城県ひたちなか市津田1948-2
こむろ歯科医院 院長 小室 文相
TEL 029-275-4184 FAX 029-229-0561
ご署名 印

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

修理業者 株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
塚PJ '18/11/01 元森	塚PJ '18/11/01 関口

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 こむろ歯科 御中 製造番号 100004
住所 茨城県ひたちなか市大字津田1948-2
点検日 2018年 10月 25日
点検時間 ~ 点検者 関口

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒312-0032 茨城県ひたちなか市津田1948-2

こ む ろ 歯 科

院 長 小 室 文 相

2018年 11 月 2 日

TEL 029-275-4184 FAX 029-229-0561

ご署名

㊞

本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528