


点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 2 月 25 日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 2 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	わたなべデンタルクリニック 様	TEL: 0246-63-6480	
所在地	福島県いわき市植田町中央1丁目12-5	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2018 年 1 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100289	運転回数: 73	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ 循環水ポンプインペラ破損による循環水圧低下異常 → 前回修理時(2018年11月)に器材が検出されました			
原因			
・ 循環水ポンプ内部に異物混入等での強い衝撃を受けてインペラが破損と判断致します。			
処置、作業内容			
・ 循環水ポンプ交換 ・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

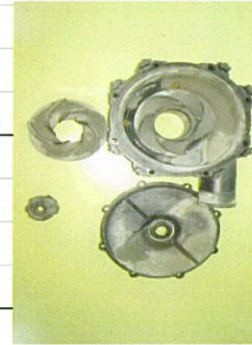

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水ポンプ交換		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒974-8261 福島県いわき市植田町中央1-12-5

わたなべデンタルクリニック

ご署名 長 渡辺重樹 印

TEL 0246-63-6480 責任技術者 0246-63-6480 作業者

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

