

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020 年 1 月 6 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 12 月 27 日		作業時間： Hr
顧客名	公益社団法人 茨城県歯科医師会 口腔センター水戸 様	TEL： 029-254-4177	
所在地	茨城県水戸市見和2-292	ご担当 様	
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 12 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14070112	運転回数：1882	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ 停電異常			
原因			
・ 写真のソケット部に水が飛散してショートしてしまい、漏電ブレーカーが働いたと考えられます。 ・ 水漏れ原因は循環ポンプ出口バンドの締め付けの緩み			
処置、作業内容			
・ 停電エラー→ソケットを高い位置に固定 ・ 水漏れ→バンド増し締め ・ 定期メンテナンス実施 ・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアバッキン		1		
2	HEPAフィルター		1		
3	プレフィルター		1		
4	洗剤ポンプチューブ		1		
5	仕上剤ポンプチューブ		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期保守費用に含む

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 1 月 16 日

ご署名

鈴木

印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ
'19/12/27
富田

環境PJ
'19/12/27
安田

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様	名称 公益社団法人 茨城県歯科医師会 口腔センター水戸 様	製造番号 14070112	点検実施日 2019/12/27	JIS承認印	
	住所 茨城県水戸市見和2-202	運転回数 1882	点検実施者 JHI7アグリテック 安田		
	納入場所 同上	サービス形態 定期保守点検	モリタ担当部署 モリタ水戸営業所		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアーフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価


- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)



洗浄前



洗浄後

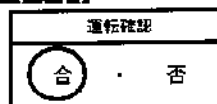

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1式
・HEPAフィルター	1式
・プレフィルター	1式
・洗剤・仕上剤ポンプチューブ	1式

株式会社JHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030