

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 4月 22日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 4 月 11 日 作業時間: Hr
顧客名	古木歯科医院 様 TEL: 029-248-6058
所在地	茨城県水戸市東野町152-5 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐
装置情報	製造番号: 100097 運転回数: 1475 運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴	
・ エラー2 洗浄槽満水	
原因	
・ 凝縮タンク内エア抜きパネルに若干の隙間があり、それより冷却水の槽内侵入の恐れ → 洗浄槽内の排水過多の可能性	
・ 本体設置時の全面アジャスト調整の上げすぎ	
処置、作業内容	
・ 凝集タンク内エア抜きパネルの若干の隙間をシーリング→洗浄槽排水と凝縮タンク排水を分割処理	
・ 各種調整、清掃、運転動作確認	
特記事項	

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
古木歯科医院 院長 古木 要 〒310-0816 茨城県水戸市東野町字古部152-5 TEL 029(248)6057			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 23 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/04/22 富田	環境PJ '19/04/22 桐野