

点検・修理報告書

管理 No. 20143

発行日: 2020年8月20日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 8 月 18 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	杉田歯科医院 様	TEL: 0293-24-3911
所在地	茨城県高萩市本町1-223	ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 水戸営業所	ご担当 中條 様
納入年月日	2017 年 12 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品 —
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張 <u>引取</u>	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

設置情報	製造番号: 100287	運転回数: 872回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・定期点検後に、器械後方部からジリジリ音がするようになった。		
原因		
・電磁弁（真空弁）に異物が挟まったことにより、ジリジリという音が出ておりました。		
処置、作業内容		
・電磁弁（真空弁）の交換を実施しました。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 電磁弁（真空弁）	762261320	1	—	—
2				
3				
4				
5				
1. 有償 <u>2. 無償</u>		部品代 合計		¥0
		技 術 料		¥0
		出 張 料		¥0
		合 計		¥0

お客様ご確認事項

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

杉田歯科医院

高萩市本町1-223

TEL 0293-24-3911 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

保証	旧責任技術者	作業者
 高池	 富田	 三宅