

2010年7月7日

松南病院 御中

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下

作 業 報 告 書

場 所：長野県松本市笹部3-13-29

作 業 日：2010年6月29日

機 種：内視鏡洗浄機ONW-10

製造機番：000164

作業内容：定期点検・確認

＊ 点検確認作業・交換部品作業の実施（作業時間1.5h）

＊ 定期交換部品

オゾン分解触媒

＊ 性能確認

オゾン水濃度 0.5mg/L（規格値0.3mg/L）

発生酸素 濃度：93.5%（規格値90%以上）

流量：0.76L/min（規格範囲値0.73～0.82L/min）

コメント：動作確認OK

次回、PSA部品の交換をお勧め致します。

以 上

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	松南病院			様	機種	種	OWN-10.
所在地	松本市豊郷3-13-29.				機番		164
販売店	新鋭工業販売(株) 長野営業所.				納品日		平成 年 月 日
					依頼日		平成22年 6 月 29 日
修理者	ISM 宮下	作業時間	1.5 H		作業日		平成22年 6 月 29 日

修理依頼・苦情内容

※ オゾン分解触媒の交換

不具合原因（故障箇所）と処置内容

○ オゾン分解触媒の交換

○ 試運転 → OK

※ 次回、PSAの交換が必要となります。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン分解触媒	1	

22年 6 月 29 日

ご署名

西沢 美紀

年 月 日

板南病院

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: IHIシバウラ 宮 下

点検年月日	22.6.29	機種名	ONW-10	製造機番	164
設置場所				TEL	
納入時期		使用時間		御対応者	面談様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
発生酸素	正常	☒	濃度: 93.5%	流量: 0.76	L/min	圧力: ~ MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☐	一式	
吸湿筒	交換	☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換	☐	一個	
オゾン分解触媒	交換	☒	一個	

年 月 日

御署名