

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-00052

No. 110824

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 長野支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	山梨県富士吉田市上吉田4230-2			機番	001028
環営	ユーザー名	高田内科クリニック 様			納入日	平成18年9月6日
	点検者	中澤一裕	作業時間	2Hr	受付日	平成23年6月28日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成23年8月9日

修理依頼・苦情内容


- ・ エラー8（オゾンガス漏れ）修理
- ・ 定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

本機にはオゾンガス漏れを検知する「オゾンセンサー」を搭載しています。今回の原因はこのセンサーが故障したことを検知してエラー8が出ました。

オゾンセンサーの交換と併せて
定期部品の交換、運転検査、清掃
を実施しました。

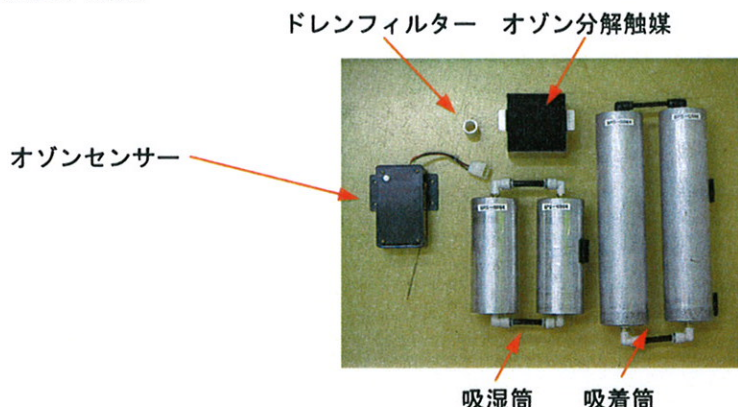

〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.41～0.55 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：94.0% 酸素流量：0.74 L/min 圧力：0.109～0.183 MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

承認



審査



作成

H23.8.24
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒（PSA用部品）	1式	SPS-10582
	ドレンフィルター	1個	
	オゾン分解触媒	1個	
	オゾンセンサー	1個	
	排水ホース 2m	1本	今回無償