

VX08-0109

2008年8月27日

ながはしクリニック 御中

株式会社 IHI シンバウラ
環境事業部 環境営業・メンテナンス部

作業報告書

承認	審査	作成
		

作業日 : 2008年8月25日

機種 : 内視鏡洗浄機ONW-10

機番 : 000850

作業内容 : オゾン分解触媒交換

オゾン分解触媒は、内視鏡洗浄機内から排出するオゾンを酸素に還元するものです。劣化してきますと、酢酸のような臭いを発生し、さらに劣化しますと、オゾンが還元されずに、排出されますので、年に1回の定期交換が必要です。(写真1: 交換したオゾン分解触媒)

その他 : ・酸素流量 0.80L/min (基準0.80L/min)

・酸素濃度 92.5% (基準90.0%以上)

・空運転でのオゾンインジケータの変色に異常ないことを確認。
(写真2: 変色後のインジケータ)

写真 :



写真1

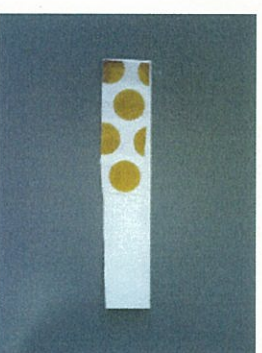


写真2

以上