

2010年6月10日

とものクリニック御中

株式会社IHIシバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下

作 業 報 告 書

場 所：静岡県磐田市中泉2270-8

作 業 日：2010年6月4日

機 種：内視鏡洗浄機ONW-10

製造機番：001575

故障内容：エラー表示「18」洗浄槽の水が完全に排水されない。

故障原因：排水系統の詰り。

作業内容：排水管清掃

洗浄槽の排水口から、ピンチバルブまでの排水管路が黒い物体で閉塞気味になっていました。このため、通常の排水速度より低下していた事が排水異常の原因と考えられる為、排水管路の清掃を行い排水管路の確保を致しました。

：運転確認

- ・ 洗浄槽を満水にした状態で強制終了させ排水させる。
→異常なし
- ・ 洗浄工程を2サイクル実施する。
→異常なし

コメント：アルコールモード使用後の空運転をして頂くことをお奨め致します。

以 上

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お 客 様	とものクリニック 様	機 種	ONW-10
所 在 地	静岡県磐田市中泉2270-8	機 番	001575
販売店	新鋭工業販売株式会社 静岡営業所	納 品 日	平成21年2月23日
		依 頼 日	平成22年5月24日
修 理 者	ISM 宮 下	作業時間	2.0 H
		作 業 日	平成22年6月4日

修理依頼・苦情内容

・エラー表示「No.18」

不具合原因（故障箇所）と処置内容

・排水チューブ・排水スリッパの排水系統の確認。

※処置内容 確認内容

・言式運転個目→NG.エラー表示

・排水チューブ・排水スリッパに黒い排水があり、排水管路が臭気味に汚れている。

・排水管路の洗浄を行う。

※性能確認

・排水流量：0.794/min.

・排水濃度：92.0% 圧力：0.28/0.134

・インポート良好。

※処置後、2回試運転を行う→OK.

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備 考

2020年6月4日

ご署名

山下 美奈子