

荊 病院

御中

23年 8月 8日

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: IHIシバウラ 宮 下

点検年月日	2011.8.8	機種名	ONW-10	製造機番	650
設置場所				TEL	
納入時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
発生酸素	正常	☒	濃度: 8.4% 流量: 0.75 L/min 圧力: 0.125 MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

10070→10566

23年 8月 31日

御署名 松浦 崇行

日付: 2011. 8. 31

作業者 ISM 宮下

ONW-10機番: 200650

PSA機番 10566

客先: 芦川病院

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10070)

合/否

ドレン用フィルターを交換したか

合/否

排水シリコンチューブを交換したか

合/否

オゾン分解触媒を交換したか

合/否

配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと

合/否

取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか

合/否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)

合/否

酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上) (93.4 %)

合/否

酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (0.75 L/min)

合/否

PSA圧力の確認 (0.072 Mpa) ~ (0.185 Mpa)

参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか

合/否

フロントパネルのランプは配線したか

合/否

フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か

合/否

ドレンチューブは接続したか

合/否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか

合/否

内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か

合/否

洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)

合/否

定期メンテナンスシールに点検日を記入したか

合/否

定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)

合/否

別紙 点検確認書に記録したか

合/否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)

合/否

運転は正常か、エラーはでないか

合/否

インジケータの変色は良好か

合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)