

フリニッ7 井田

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部営業メンテナンス

点検担当者: IHIシバウラ 宮 下

点検年月日	2012.9.26	機種名	ONW-10	製造機番	1102
設置場所				TEL	
納入時期		使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
発生酸素	正常	☒	濃度: 9.6%	流量: 0.75 L/min 圧力: 0.10 ~ 0.198 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント ASA 10090 → 11097
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

2012年 9月 26日
御署名 井田 勝也

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ

環境事業部

日付: 2012.9.26

作業者 IHIシバウラ 宮下

ONW-10機番: 1102

PSA機番: SPS-11097

客先: 71ニッ7 井田

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-11090)

合/否

ドレン用フィルターを交換したか

合/否

排水シリコンチューブを交換したか

合/否

オゾン分解触媒を交換したか

合/否

配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと

合/否

取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか

合/否

PSA性能確認

圧カススイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)

合/否

酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上) (94.6 %)

合/否

酸素流量は適切か (0.73~0.82 L/min) (0.75 L/min)

合/否

PSA圧力の確認 (0.10 / Mpa) ~ (0.198 Mpa)

参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか

合/否

フロントパネルのランプは配線したか

合/否

フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か

合/否

ドレンチューブは接続したか

合/否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか

合/否

内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か

合/否

洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)

合/否

定期メンテナンスシールに点検日を記入したか

合/否

定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)

合/否

別紙 点検確認書に記録したか

合/否

確認試験

オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3 mg/L以上)

合/否

運転は正常か、エラーはでないか

合/否

インジケータの変色は良好か

合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)