

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年6月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100273	
作業年月日	平成24年6月27日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	佐野記念クリニック 様		TEL	0544-27-1151	
所在地	静岡県富士宮市宮町13-30		担当	様	
販売店	(有) ナビ		担当	様	
納入年月日	平成23年6月27日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ 1.0 1.2 数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 389	更新(セット)実施・未実施	殺菌: 55	殺菌+7L: 334
	リークチェック: 3	自己洗浄: 4	アルコール単独: 1	エア単独: 157

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
フィルター		☒	1			☐	
オゾン分解剤		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H24年6月27日

ご署名 藤木隆彦



株式会社 IHI シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
TEL 0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下