

修理報告書（引き取り修理）

修理依頼
番号

No. 080121

配 布 先		納 入 先	新鋭工業販売株式会社 静岡営業所 殿			機 種	ONW-10	
客先	1	所 在 地				機 番	000446	
環営	1							
防品	1							
		ユーザ`-名	東山クリニック 様			納 入 日		
		修 理 者	中澤一裕	作業時間		受 付 日	2007 年 9 月 27 日	
		返 送 先	納入先と同じ			発 送 日	2008 年 1 月 23 日	
計	3							

修理依頼・苦情内容

PSA（酸素発生装置）改修
装置内クリーニング

不具合原因（故障箇所）と処置内容

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

PSAの改良に伴う部品の追加と運転プログラムの変更を実施しました。

装置の水槽と配管内を洗浄しました。

総運転回数：756回

[2] 修理・点検内容

1. PSA性能確認

酸素濃度：93.1% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.101~0.182 Mpa

2. 運転プログラムバージョンアップ（Ver10.2→Ver10.10）

3. 運転確認 異常なし。インジケータ変色異常なし。

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	PSA	1	SPS0018

承認



審査



作成

H20. 1. 24

中澤

株式会社 I H I シバウラ