

2012年7月23日

佐々木クリニック 御中

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部
営業部 販売グループ

宮 下

作 業 報 告 書

場 所：静岡県静岡市清水区押切1738-1
作 業 日：2012年7月19日
機 種：OED-1000
製造機番：100249

作業内容：保守点検

- * 点検項目順に点検作業の実施（作業時間1.0h）
- * 点検交換部品の交換作業（交換部品）
 - ・ オゾン濃度計
 - ・ オゾンガスセンサー
 - ・ 排水栓
 - ・ フィルター
 - ・ オゾン分解触媒
- * 性能確認
 - ・ 保守点検報告書参照
- * 清掃作業

以 上

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年7月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100249
作業年月日	平成24年7月19日		作業時間:	1.0 Hr
顧客名	佐々木77ニ-7 様.		TEL:	054-348-6606
所在地	静岡市清水区押切1938-1		担当	様
販売店	ベルディ3045ア(株)		担当	大川原 様
納入年月日	平成23年7月22日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数:	368	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	368	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	122	7L単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		24年7月18日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		ご署名 中橋 寛 印
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		

株式会社IHIシバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-4756

責任技術者	作業者
	宮下