

中島内科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

異音対応

点検担当者： 中澤 裕

点検年月日	平成 24年 9月 3日	機種名	ONW-10	製造機番	000668
設置場所	1F 内科候室			TEL	: 0537-22-6819
設置時期	平成 17年 7月 13日	運転回数	1162	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☒
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 93.5 % 流量: 0.79 L/min 圧力: 0.105~0.190 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ FTS 純正品	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
酸素発生装置 (PSA)	交換 ☐		水ポンプ (P-1) の異音を確認し、 これで交換しました。 酸素発生部の性能が低下して いましたので左表で交換しました。
吸着筒・吸湿筒	交換 ☒	1 缶	
ドレンフィルター	交換 ☒	1 個	
オゾン水分解媒	交換 ☒	1 個	
水ポンプ (P-1)	交換 ☒	1 缶	
	交換 ☐		

運転プログラム Ver 8 → Ver 10 書換

平成 24 年 9 月 3 日

12 回運転すると「フィルター」が点滅して
お知らせするようになりました。

ご署名 中島 洋



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。