

修理報告書（引取り修理）

修理依頼  
番号

No. 120801

|       |                    |      |     |            |
|-------|--------------------|------|-----|------------|
| 納入先   | 新鋭工業販売株式会社 静岡営業所 殿 |      | 機種  | ONW-10     |
| 所在地   | 静岡県富士市中央町2-13-20   |      | 機番  | 000650     |
| ユーザー名 | 芦川病院 様 定期点検契約      |      | 納入日 | 平成16年7月14日 |
| 点検者   | 中澤一裕               | 作業時間 | 受付日 | 平成24年3月13日 |
| 返送先   | 納入先と同じ             |      | 発送日 | 平成24年7月31日 |

修理依頼・異常内容

エラーH（排水異常）

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

エラーH（排水異常）

排水経路の詰まりと水位センサー、排水ポンプの性能低下が原因で、これらを清掃、部品交換して復旧しました。（写真1）

水槽破損

輸送時の衝撃で水槽上部が破損していましたので、新品に交換いたしました。（写真2）


給水経路の詰まり

給水電磁弁を分解点検したところ、写真3のように粉状の物が詰まっていました。  
給水異常や水ポンプ異音の原因になりますので、フィルターの設置かメンテナンスをお願いいたします。

写真1：交換部品1式

写真2：洗浄水槽

写真3：フィルター（左側が清掃後のフィルター）

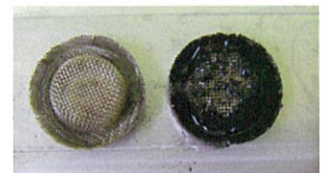

〔2〕修理・点検内容

- 部品交換及び内部分解清掃（下表および写真を参照ください）
- オゾン水濃度測定：0.36～0.51 mg/L（水温29度）・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常  
酸素濃度：92.6% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.105～0.185 MPa
- 運転確認 異常なし。オゾンインジケータ変色 異常なし。

〔3〕定期点検

8月31日が定期点検予定日ですが、日程は代理店とご相談のうえ、ご用命ください。

—以上—

承認



審査



作成

H24. 8. 1  
中澤

交換部品

| 部品コード | 部品名称               | 数量 | 備考   |
|-------|--------------------|----|------|
|       | 排水ポンプ（P-3）         | 1台 |      |
|       | 水位レベルセンサー（L,H,HH）  | 3本 |      |
|       | 洗浄槽（ホース類、下部フィルタ含む） | 1式 | 今回無償 |