

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100426	
作業年月日	平成 25 年 5 月 22 日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	三神医院 様		TEL:		
所在地	静岡市		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 24 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴なし。

不具合原因、作業内容

通常点検 + コントローラ交換。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数 × 96
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 227	更新 (Oセット) 実施・未実施	殺菌: 8	殺菌+7L: 219
	リークチェック: 0	自己洗浄: 66	7L単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1	吸盤		☒	3
“ ” フィタ		☒	1	コントローラ (無償)		☒	1
オゾン センサ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン分解能ホース		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

三神美久

印

株式会社 I H I シバウラ
環境事業部 営業・メンテナンス部
長野県松本市石芝1-1-1
0263-25-9123

責任技術者

作業者

浦野