

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ
環境事業部

日付: 2019. 6. 18.

作業者 ISM 宮下

ONW-10機番: 1287

PSA機番 11307

客先: 荻野77ニッ7.

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS- 426)	☒ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 否

PSA性能確認

圧力スイッチのゼロ点は合っているか (± 0.005 Mpa以内)	☒ 否
酸素濃度の確認 (運転開始から約3分後) (90%以上)	(93.4 %) ☒ 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82 L/min)	(0.78 L/min) ☒ 否
PSA圧力の確認 (0.084 Mpa) ~ (0.160 Mpa)	参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	☒ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 否

確認事項

フタパッキンに剥がれはないか	☒ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか (汚れある場合清掃)	☒ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 否
定期点検カウンタをリセットしたか (フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 否

確認試験

オゾン水濃度の確認 (オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

荻野