

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

No. 130607

配布先	納入先	新鋭工業販売株式会社 静岡営業所 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	静岡県浜松市北区初生町 715-1		機番	000926
環営	ユーザー名	浅井外科 様		納入日	平成 19 年 11 月 18 日
	点検者	小野定之	作業時間	受付日	平成 25 年 4 月 30 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 25 年 6 月 7 日

修理依頼・苦情内容

・漏電により電源が入らない

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

不具合原因）筐体内の水漏れによるブレーカトリップ（電源が入らない状態）

- ・接続ホースの一部より水漏れが起こり水ポンプのコネクタ部に水が、かかりブレーカトリップ状態となり電源が入らなくなったと思われます。

処置）・水漏れ箇所の修理（ホースバンドの締め直しを行いました。）

- ・30分水漏れ確認運転の実施（水漏れは、確認できませんでした。）
- ・コネクタ部の水かかり防止対策（ビニールカバーを取付ました。）写真参照



〔2〕修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.42～0.68mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.4 % 酸素流量：0.78 L/min 圧力：0.114～0.203MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
25.6-7				
中				
25.6-7				
澤				
作成				
小				
13.6.07				
野				