

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-39069

No. 130704

配布先	納入先	新鋭工業販売株式会社 静岡営業所 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	静岡県浜松市新津町 40-1 サンポートビル 101			機番	00865
環営	ユーザー名	七草ファミリークリニック 様			納入日	平成 18 年 4 月 21 日
	点検者	小野定之	作業時間	2 Hr	受付日	平成 25 年 5 月 28 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 25 年 7 月 4 日

修理依頼・苦情内容

- ・ポンプより、異音がします。
以前、P-1 および P-2 のポンプは交換済み

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

再現確認）確認運転を 10 回実施しましたが、異音は再現しませんでした。

処置） P-1 と P-2 の水ポンプは交換実施済みとの内容でしたので、
不具合要因と思われます P-3 の排水ポンプの交換を行いました。



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.44～0.56mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.3 % 酸素流量：0.77 L/min 圧力：0.118～0.206MPa（AC100V、60Hz）
- 運転動作確認・・・正常
- オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
安 25.7.-4 田	762301130	水ポンプ	1 個	
審査				
中 25.7.-4 澤				
作成				
小 13.7.04 野				