




株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービス部 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区順大寺新道10番6

TEL086-944-8528

FAX086-942-9030

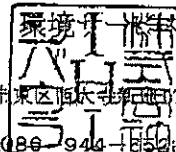

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	お印
	たけなえ歯科医院様	100005		
	住所 川口市赤土 1440-1	納入検査実施日 2015年12月24日		
	納入場所 048-291-6480	納入検査実施者 エムシーサービス(株) 住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認 /		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	網カゴ、破損汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	キズ・汚れ
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	運転プログラムの確認
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	入力・出力確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	134℃乾燥モードコンパクトPCD・BMS-Test STEAM
			性能評価	✓	リークチェックテスト
			その他	✓	付属品の確認
					運転説明
				✓	装置内運転時異音

備考			
設置状況 左側30mm			運転説明は後日
上側0mm			
右側100mm以上			

熱がこもることを説明済み

材料を引き出して使用してもらう