株式会社||H|ミリバウラ

品質保証部

<u>岡山 FAX(086) 942-9030</u>

IC Clave IC Washer 不具合報告書

TEL

FAX

支店名	モリタ横浜支店	担当者名	遠藤 様
ユーザー名	あい歯科医院	お客様担当者	
納品年月日	2016/3/10	機種名/機番	IC W/100095
発生年月日	2016/3/10	発生場所	神奈川県藤沢市弥勒寺3-12-15

不具合内容

●内容

洗剤チューブから洗剤を吸い上げない(設置設定時に発覚) 洗剤チューブノズル部分に詰まり有。洗剤チューブ不具合品。

(対応)

不具合品により翌日交換







回答

【原因】

洗剤チューブに関してはエア漏れの検査を行っているが、エア漏れ検査ではつまりが発見 できなかった。

【対策】

エア漏れ検査に加え、流量検査を実施することとする。

通常運転では50mlに対し25sでエラー判定となる。

実際には15s程度であるため、判定基準を20sとし、20s以上要するものはNG判定とする。 また、安定するまでは業者による検査に加え、製造Gによる受入検査を行い、ダブルチェックを 行う。

品保本 '16/03/23 太田

16/03/2 池

'16/03/22 中村

16/03/21 高