

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

02-46179

No. 140707

配布先	納入先	新鋭工業販売株式会社 静岡営業所 殿			機種	ONW - 10
客先	所在地	静岡県浜松市東区積志町 995			機番	000363
環営	ユーザー名	中岡クリニック 様			納入日	平成 17 年 5 月 11 日
	点検者	小野定之	作業時間	8 Hr	受付日	平成 26 年 6 月 17 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 7 月 8 日

修理依頼・苦情内容

- ・エラー “ 2 ” 発生
- ・ポンプの音が大き
- ・オーバーホール(総合メンテユーザー様)

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・エラー “ 2 ” の原因である水位センサー（LVH1, LVH2）の交換をしました。
- ・ポンプの音の大きな原因であるエアポンプの交換を行いました。
- ・オーバーホール対応により性能劣化部品の交換を行いました。

写真 1)

エアポンプ ASSY、エアポンプ、
水位レベルセンサー（LVL, LVH1, LVH2）



写真 2)

水ポンプ（P-1, P-2, P-3）、オゾンセンサー ASSY
フタスプリング、配管チューブ



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定： 0.5 mg/L ・ 正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検 ・ 正常
酸素濃度：93.5 % 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.102 ~ 0.181 MPa（AC100V, 50Hz）
4. 運転動作確認 ・ 正常
5. オゾンインジケータ変色 ・ 正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	個数	備考
762301120	エアポンプ ASSY	1 個	
762300840	エアコンプレサー	1 台	
762301210 他	水位レベルセンサー (LVL, LVH1, LVH2)	3 本	
762301130	水ポンプ	3 台	
762301322	オゾンセンサー ASSY	1 個	
762872262	フタスプリング	2 個	
	配管チューブ	1 式	

承認

若

14/07/08

井

審査

若

14/07/08

井

作成

小

14/07/08

野