

ICW IM-205-1



株式会社IHI

機械事業本部 営業

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	幸町歯科口腔外科様	製造番号	100239	ご確認	
	住所	埼玉県志木市幸町1-12-16	納入日	2017年8月15日		
			納入検査実施者	安藤、星佳、中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		有	ラック仕様切換(バンドビースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能		インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
電装系	✓	給湯温度(45~50℃)	その他	✓	装置内運転時異音・振動
	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ			
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
電装系	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	運転検査結果	☐ 良好 ☐ 不良	トシ

特記事項

ICW IM-205-1



株式会社IHI


機械事業本部 営業

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地10-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

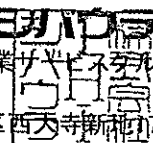

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシパウラ用

お客様	名称	幸町歯科口腔外科様	製造番号	100242	ご確認	
	住所	埼玉県志木市幸町1-12-16	納入日	2017年8月15日		
			納入検査実施者	安藤 星佳 中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		有	ラック仕様切換(ハットピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能		インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			運転・お手入れ方法の説明
		給湯温度(45～50℃)			装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他	✓	装置内運転時異音・振動
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			
			運転検査結果	☐ 良好 ☐ 不良	トシ



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170番11

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	製造番号		ご確認	
	住所	納入検査実施日			
	納入検査実施者				
	幸町歯科口腔外科 様	100267	2017年8月15日		
	埼玉県志保市幸町1-12-16	安藤 星佳 中村			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	性能評価	✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	B & Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか	その他	✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

ICC IM-205-1



株式会社IHIシバウラ
機械事業本部 営業サービス部
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地1-10-1
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	幸町 産科口腔外科	製造番号	100268	ご確認	
	住所	埼玉県志木市幸町1-12-16	納入検査実施日	2017年8月15日		
			納入検査実施者	斎藤 星佳 中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	蓋の取付取外しに問題が無い		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水	性能評価	✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	リークチェックテスト
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	タンク内に汚れはないか	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水		✓	装置内運転時異音
	✓	コネクタ部からの水漏れ(無いこと)			
スペース	✓	設置スペースの確保			
	✓	右90×左50×背面75×天面250mm以上			
	✓	熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと			

特記事項

ICC IM-205-1



株式会社IHIインバウラ

機械事業本部 営業サービス

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地1-10-10

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIインバウラ用

お客様	名称	幸町歯科口腔外科様	製造番号	100270	ご確認	
	住所	埼玉県志木市幸町1-12-16	納入検査実施日	2017年8月15日		
			納入検査実施者	宮藤 聖佳, 中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない 蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか	性能評価	✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水 コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項